

蓝港 HOLTER 动态心电图分析系统 常见故障与排除方法列表

	故障现象	故障原因	排除方法
1	电脑无法开机或无法正常使用	电脑发生故障	与当地电脑维修人员联系
2	打印机无法打印	打印机连接问题、打印机设置问题、打印机卡纸、打印机故障	检查打印电缆、打印参数设置、清除卡纸或与打印机厂家联系
3	本系统软件无法正常运行	参数设置有误、自行安装无关软件、感染病毒	设置正确参数、卸载其他软件、清除病毒重新安装本软件
4	记录器无法记录心电图	没有插卡、卡上数据没有清除	插入存储卡、清除存储卡上数据
5	记录不满 24 小时	电池电量不足、记录器功耗过大	更换电池、设备返回维修
6	记录器数据无法传输到电脑	存储卡故障、读卡器故障、电脑容量不足	格式化存储卡、更换读卡器、删除电脑部分数据
7	病人运动时干扰特别大	电极与皮肤接触不好、导联线接触不良	清理皮肤、更换电极、更换导联线
8	分析心电图时判断不准确	参数设置不合适	更改参数（具体见说明书）
9	软件界面显示不正常	显示参数设置不合适	将显示设置调整为相应的分辨率和字体
10	分析心电图时出现错误	操作有误、数据干扰过大	严格按操作规范操作、降低干扰