

蓝港运动负荷心电测试系统 常见故障与排除方法列表

	故障现象	故障原因	排除方法
1	电脑无法开机或无法正常使用	电脑发生故障	与当地电脑维修人员联系
2	打印机无法打印	打印机连接问题、打印机设置问题、打印机卡纸、打印机故障	检查打印电缆、打印参数设置、清除卡纸或与打印机厂家联系
3	本系统软件无法正常运行	参数设置有误、自行安装无关软件、感染病毒	设置正确参数、卸载其他软件、清除病毒重新安装本软件
4	设备无法采集心电图	采集盒、导联线连接有误或出现故障	检查连接情况
5	无法由电脑控制跑台	跑台通讯电缆连接有误	检查电缆连接
6	跑台运行时突然停止	电源电压不稳	连接独立电源或加稳压器
7	病人运动时干扰特别大	电极与皮肤接触不好、导联线接触不良、没有连接地线	清理皮肤、更换电极、更换导联线、连接地线
8	分析心电图时判断不准确	参数设置不合适	更改参数（具体见说明书）
9	软件界面显示不正常	显示参数设置不合适	将显示设置调整为相应的分辨率和字体
10	分析心电图时出现错误	操作有误、数据干扰过大	严格按操作规范操作、降低干扰